


Tentaculus

Kognitivt stöd, passivt- och aktivt larm

En helhetslösning för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, deras anhöriga och personal

Evalena Habel
Marknadschef

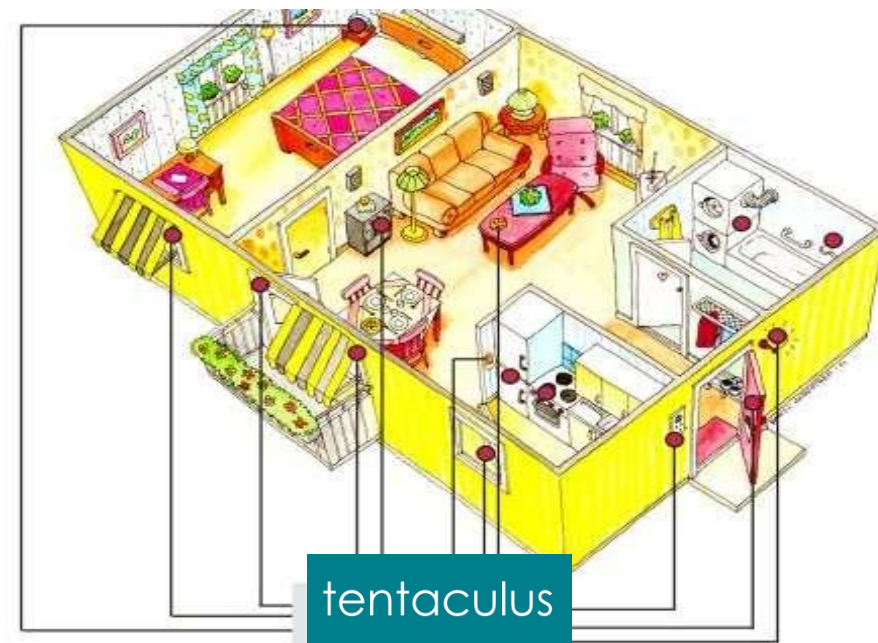

Kognitiva svårigheter

- att kliva upp på morgonen och gå och lägga sig i tid
- vila lagom länge på dagen
- att äta regelbundet
- att komma ihåg att ta sin medicin
- komma ihåg saker när man går ut
- komma ihåg städ- och tvättdag
- Kan leda till oro – ångest – tvång

Tekniken

Trådlös kommunikation med radiovågor



Sensorsignal
via sändare →



Via bredband
Övervakning av tekniken
Programmering/Justering
Support



Kalenderfunktion med tids-
och dygns inställningar

Instruktioner →



SMS



Kognitiva stödfunktioner



Dygnsstöd

med BedSense:

- väckning med favoritmusik
- talade måltidspåminnelser
- påminnelse om att gå och lägga sig


Påminnelsestöd via :

- SMS
- inspelade ljudfiler
- musik
- blinkande ljus
- symboler



Rutin- och Aktivitetsstöd:

- Talade påminnelser om vardagsrutiner
- start och stopp av aktivitet
- Instruktioner och kvittering

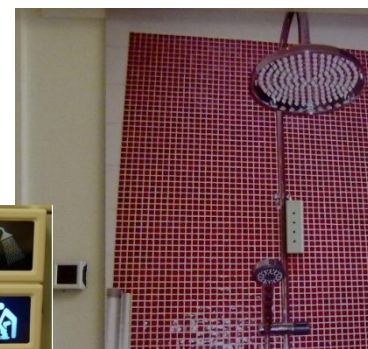

Strila duschstöd:

- start och stopp
- ger talade instruktioner via talsyntes eller inspelade ljudfiler
- flexibla tidsintervall



Gå ut-stöd:

- påminner om vad du ska ta med dig när du går ut
- ger säkerhetsstatus innan du går ut, t.ex. öppen balkongdörr
- påminner om att låsa dörren



Trygghetsstöd:

- ger status på olika funktioner hemma t.ex. öppna fönster och dörrar, kaffebryggare på, strykjärn på



Medicinstöd:

- ger talade påminnelser via talsyntes alternativt inspelade ljudfiler och musik
- talar om ifall du bör vänta eller redan har tagit din medicin

En dag med Tentaculus

- 10:00 väckning "Like a virgin" + egen röst "God morgon!", snoozar 2 ggr
- 11:30 – "Dags för lunch och medicin"
- 12:00 – 14:00 "Nu är det okej att vila, jag väcker dig om 30 minuter"
- Efter 30 minuter "Nu har du vilat klart" snoozar 2 ggr
- 14:00 – 19:00 "Du ska inte vila nu" upprepas var femte minut tills man kliver upp
- 17:30 – "Dags för middag och medicin"
- 22:00 "Nu är det dags att gå och lägga sig"

Teknik: Centralenhet, Sängsensor, högtalare

Projekt

- BTH – Blekinge tekniska högskola, Ronneby kommun (pågår)
 - Installation på gruppboende för personer med Autism
- Tentaculus mobile – Blekinge Innovation Centre (BTH) + Carema (pågår)
 - Vi utvecklar en ”app” som ska ge information om hemmets status när du är borta
- Livsstilsboende på Aspö (påbörjas hösten 2011)
 - Seniorvillor där fastighetsägaren ”bygger in” ett Trygghetspaket bas , senare kan olika trygghetsfunktionerväljas av hyresgästerna
- Hjälpmedel i fokus för personer med psykiska funktionsnedsättningar (2010)
 - 6 testpersoner har provat Tentaculus kognitiva stöd funktioner, projektrapport laddas ner från www.hi.se

Visningslägenhet

Tentaculus Independent Living

Sveavägen 76 i Stockholm

Bokning: 08-120 029 00

evalena@tentaculus.com

www.tentaculus.com

Tentaculus är ett system som bidrar till ökad trygghet, höjd livskvalitet och säkrare boende, så att människor får större möjlighet att delta i sociala sammanhang